

Reinigungshinweise für Prothesen und Komposit-Verblendungen

Wie die natürlichen Zähne, müssen Prothesen und Komposit-Verblendungen regelmäßig gereinigt werden. Durch den übermäßigen Genuss von Tee, Kaffee, Rotwein, Nikotin etc. können Ablagerungen oder Verfärbungen entstehen, die sich bei täglicher und richtiger Reinigung sehr gut beseitigen lassen.

Für die Reinigung von Zahnersatz empfehlen wir folgendes:

1. Die richtige Zahnbürste: Mittelharte bis weiche Zahnbürste mit gleichmässigem Borstenfeld (multitufted).
2. Die richtige Zahncreme: Geeignete Zahncremes haben ein wenig abrasives aber gut reinigendes Potential, das durch "hydrated silica" auf der Tube ausgewiesen ist. Weitere Abrasivmittel, wie z. B. Calciumcarbonate, Calciumphosphate oder Aluminiumoxid sollten hier nicht aufgeführt sein.

Nach unseren Erfahrungen sind z. B. **empfehlenswerte Zahncremes** (*gute Reinigungswirkung, geringes Abrasivpotential*): Colgate (Marke Total, Micro, Zahnstein u. a. **kein** Colgate Gel), Aldi, Dentagard, Mentadent C, Oral B.

Weniger empfehlenswerte Zahncremes: Odol-dent-3, Odol-med-3, Colgate Gel (*gute Reinigung bei gleichzeitig hohem Abrasivpotential*), Elmex (*geringe Reinigungswirkung ohne Abrasivpotential*).

Ihr Heraeus Dental Team